

# Gastrin

## תיאור הבדיקה

### CPT קוד

82941

### שם הבדיקה

Gastrin

### שמות נוספים לבדיקה

גסטרין

### לאבחנה/טיפול

1. אבחון הפרשת יתר של גסטרין. 2. סיוע באבחון תסמונת על שם זולינגר-אליסון ומעקב אחר יעילות הטיפול בה. 3. אבחון של גסטרינומה.

### שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

(, מבוצע במעבדת חוץ באנדוקרינולוגיה איכילוב [אנדוקרינולוגיה](#))

**מיקום המעבדה**

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרת קומה 4

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302801

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

אנדוקרינולוגיה

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

צום  
יש להפסיק נטילת תוספי מזון 3 ימים לפני הביצוע

**סוג הדגימה**

דם

**נפח דגימה**

5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנת ג'ל פקק צהוב

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לאחר צום של 12 שעות, להכניס לקירור ושליחה מיידית. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום מיידית ולהעביר להקפאה בטמפ' -20c .

**תנאי שינוע**

לשלוח בקרח מיידית. גורמים מחוץ לבית החולים: על המבחנה להגיע קפואה למעבדה.

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

קריאת תוצאות

**יחידת מידה**

pg/ml

**תחום ערכים תקינים**

13-115

בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

CAP PROFICIENCY TESTING SURVEY ING

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

**הסמכה/התעדה**

ISO 9001

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

ואיכות לבקרה המכון IQC

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 22 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות