

Metanephrine, Plasma

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82382

שם הבדיקה

Metanephrine, Plasma

שמות נוספים לבדיקה

בפלזמה מטאנפרין, Metanephrines, Plasma

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לקחת דגימת דם מנבדק/ת במצב שכיבה אחרי 20-30 דקות מנוחה, בבוקר, לאחר צום לילה. אין לאכול מזונות שעשויים להעלות את רמת המטנפרינים בדם.

סוג הדגימה

פלזמה

נפח דגימה

שלוש מבחנות דם 5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

nmol/liter

תחום ערכים תקינים

0.08-0.51

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPAQAP Plasma Metanephrines

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

28 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

יש לשלוח אנמנזה עם הדגימה