

## המעבדה המטבולית

### הוראות לדיגום ומשלוח דגימה לבדיקת פירובט-לקטט

1. מומלץ למטופל להיות בצום לילה לפני לקיחת הדם ובמנוחה בזמן לקיחת הדגימה.
  2. להכנת דגימה לבדיקת פירובט-לקטט דרושות שתי מבחנות **CHTT001**, **CHTT002** המתקבלות מהמעבדה (נא ליצור קשר טלפוני להזמנת מבחנות מהמעבדה).
  3. שמור בקרור את המבחנות עד לרגע השימוש.
  4. דגום מהנבדק 4 מ"ל דם במבחנת דיגום EDTA (פקק סגול).
  5. באופן מייד, העבר במדויק 1 מ"ל דם למבחנה **CHTT001** מקוררת (מבחנה עם נוזל שקוף-חומצה פרכלורית).
  6. ערבב בוורטקס: 30 שניות, מהירות מקסימלית, הנח מייד על קרח.
  7. סרכז: 3000g, 10 min 4°C.
  8. העבר נוזל עליון צלול למבחנה **CHTT002** (מבחנה ריקה). נא לציין תאריך לקיחה על המבחנה.
  9. הקפא ב 20°C-.
  10. העבר את הדגימה הקפואה למעבדה.
  11. כל המשלוחים נמסרים במעבדה העל-אוטומטית, שיבא תל השומר.
- תהליך זה מאפשר הפרדה בין לקיחה ומשלוח הדגימה.  
אין צורך לשלוח מיד למעבדה.